

- 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。
- 檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
- 檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。
- 本產品僅評估 20 歲以上成人自行採檢結果，建議應由 20 歲以上成人使用。

提供的材料

所有提供之材料應儲存及操作於 15-30°C。

試紙條	單獨密封鋁箔袋裝
檢體萃取液	含 Sodium Azide (<0.1%); Sodium Hydroxide (<0.5%); Albumin Bovine Serum (<1%)
無菌鼻腔採檢棒	衛部醫器輸壹字第 014068 號 (普立頓 CE 2797)
(採檢棒依外盒標示為準)	衛部醫器陸輸壹字第 004555 號 (奧迪科 CE 0413)
說明書	

未提供的材料

計時器

效能

飛確 RV2 家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑以定性檢測疑似感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的患者，利用快速免疫色譜分析法，檢測其鼻腔是否具有新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)核衣殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除 SARS-CoV-2 感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。


測試前

檢測程序應保持在室溫進行。



檢體採集


檢體採集後應馬上測試。

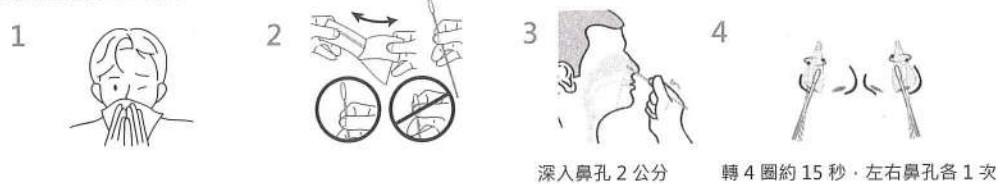

- 為取得更準確的結果，測試前請進行擤鼻涕的動作，再進行檢體採集。過程請用紙巾遮擋避免飛沫噴濺，進行檢體採集前請勿用紙巾清潔鼻孔，以避免檢體病毒量過少檢測不到。
- 撕開採檢棒包裝，過程中請確認採檢棒尖端不會接觸任何表面。
- 將採檢棒深入鼻孔約 2 cm，沿著鼻腔內壁旋轉 4-5 次後取出(過程請持續 15 秒，儘可能取得足夠的病毒量)。
- 採集完之後，請務必在另一個鼻孔，使用同一個採檢棒再進行一次採集。

測試步驟

為了避免開封受潮影響效能，鋁箔袋開封後立即使用。

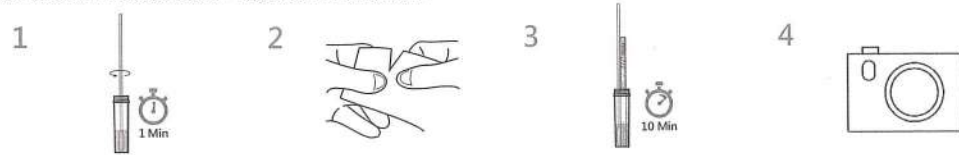

- 將沾有檢體的採檢棒，放入萃取液小管轉動 3-5 次，靜置小管內 1 分鐘，完成萃取動作。
- 採檢棒保持在小管中，撕開鋁箔袋，取出試紙條，直接將試紙條插入小管中(箭頭朝下)。
- 開始計時 10 分鐘，請勿移動試紙條，直到測試完成，於 10 分鐘時於光線充足處判讀結果，超過 20 分鐘請勿判讀。
- 請將測試結果拍照留存。

結果判讀



陽性結果(Positive)

在 10-20 分鐘時，可以看見如圖示，控制線與測試線的區域各出現一條線，就代表陽性結果，表示你可能受到感染。測試線區域即使出現一條非常微弱的線(如上圖)仍代表陽性結果。

陽性結果說明“偵測到新型冠狀病毒抗原”，您很可能感染 COVID-19，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

陰性結果(Negative)

在 10-20 分鐘時，可以看見如圖示控制線區域出現一條線，就代表陰性結果，表示您可能沒有受到感染或受到感染但病毒量很低。

陰性結果意味著導致 COVID-19 的病毒未在您的樣本中找到。但是，此檢測可能會給某些患有 COVID-19 的人提供不正確(偽陰性)的陰性結果。這意味著即使測試為陰性，您可能仍患有 COVID-19。如果是這樣的話，醫事人員將考慮檢測結果與您其他方面的病史，如症狀或可能的接觸史，以決定如何照顧您。重要的是您與醫事人員的合作，以瞭解您應該採取的下一步行動。

無效反應(Invalid)

在 10-20 分鐘時，如圖示在控制線區域沒有出現線條，即使在測試線區域有線條，此為無效測試，請重新測試。

測試完成後的處置

如檢驗結果為陽性，須前往鄰近的社區採檢院所進行再次檢驗，並將本次自行檢測的檢體及檢測裝置妥善密封，交付鄰近的社區採檢院所進行醫療廢棄物處理。如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。



注意事項

- 本產品僅被授權用於檢測新型冠狀病毒的核衣殼蛋白抗原，未授權用於檢測任何其他病毒或病原體。
- 為獲得正確的測試結果，測試前仔細閱讀使用說明書並依照操作。
- 使用前確認包裝完整，試紙條完整密封於鋁箔袋，保存期限，若有逾期損壞請勿使用。
- 本產品為一次性使用，請勿重複使用本產品，不同批號試劑請勿混合使用。
- 請勿直接將試紙條放入鼻咽或口腔等處；不正確的採集、儲存或運送方式皆可能導致錯誤檢測結果。
- 在採集檢體、處理、貯存、丟棄檢體及使用過之試劑耗材時須採取適當防護措施。
- 採集檢體時，請使用套件中提供的採檢棒，使用其他產品所附採檢棒可能會導致錯誤結果。
- 若無採集檢體或實際操作檢驗試劑等經驗，請尋求具體的培訓或參閱相關操作指南。
- 超過 20 分鐘之後的結果不予採用。
- 測試結果需搭配患者臨床症狀，由醫生進行綜合性評估。
- 試劑中含有疊氮化鈉，如果吸入，吞嚥或與皮膚接觸會將對人體有害。與酸性物質接觸可能會產生劇毒氣體。當誤觸皮膚時，請立即用大量清水沖洗。
- 有關本產品中組件的危險符號、安全性和丟棄信息，請參閱 Vstrip 網站上的《物質安全資料表》。
- 本產品依循的法規為「醫療器材管理法」第 35 條第 1 項第 2 款及特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第 9 條。

快速指引

測試前



確認組件的完整性


檢體採集



深入鼻孔 2 公分

轉四圈約 15 秒
左右鼻孔各一次

測試步驟

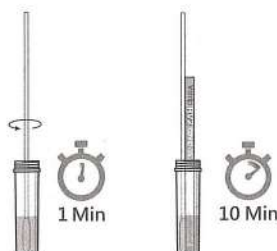


結果判讀



測試線區域即使出現一條非常微弱的線
(如上圖)仍代表陽性結果。

測試完成後的處置

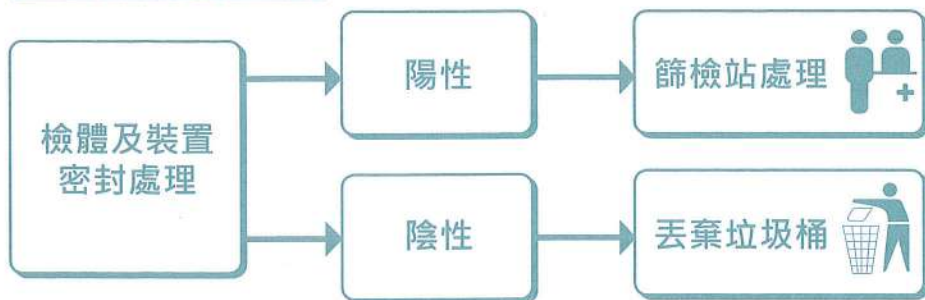

掃描 QR code
觀看操作說明

技術支援/消費者諮詢

TEL : + 886-2-2691-9896

Email : xizhi@pbf.com.tw

儲存方式

本產品應儲存於 15-30°C，不可冷藏、冷凍。

產品限制

- 陽性結果不能排除其他病原體共同感染的可能。
- 感染初期病毒抗原量低或隨著病程天數的增加，檢體中的病毒抗原數量可能減少。陰性結果有可能是因為檢體的抗原濃度低於本產品的偵測極限。
- 陰性結果不能排除新型冠狀病毒感染的可能；結果須經過分子診斷再確定。
- 新型冠狀病毒抗原決定位上的胺基酸改變時，單株抗體可能無法偵測到或導致靈敏性較差。

產品型號/包裝

1	IG13001501	1 Test
2	IG13002501	2 Tests
3	IG13004501	4 Tests
4	IG13005501	5 Tests
5	IG13020502	20 Tests
6	IG13050501	50 Tests
7	IG13060501	60 Tests
8	IG13080501	80 Tests
9	IG13100501	100 Tests

符號列表

REF	產品型號	LOT	批號
IVD	體外診斷使用		包裝損毀請勿使用
	使用前請看說明書		溫度限制
	可進行的試驗總數		不可重複使用

醫療器材商名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司
醫療器材商地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓
製造業者名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司汐止廠
製造業者地址：新北市汐止區大同路一段 306 號 6F 之 3



QuickVue At-Home COVID-19 Test



產品網站
使用影片

快得利 家用新冠肺炎快篩套組

防疫專案核准輸入第1106017376號

核准之使用範圍與用途：本產品為家用型檢驗試劑用於定性檢測疑似感染COVID-19患者鼻腔檢體中存在的SARS-CoV-2核殼蛋白抗原。當三天內檢驗二次時，請確認檢驗間隔至少24小時，但不超過36小時。可由14歲以上人員自行以拭子採集鼻腔檢體，2歲以上兒童及青少年須由家長協助。本測試無法區分SARS-CoV-1和SARS-CoV-2。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

注意：

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請立即前往社區採檢院所篩檢，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

本產品內含物



反應管



管架




檢測片



採檢棒

使用前注意事項

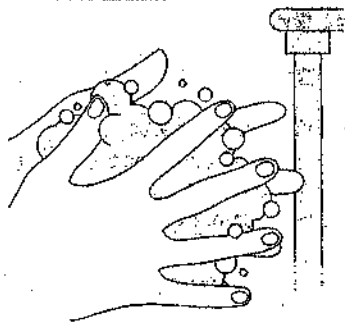

執行測試前請仔細閱讀使用說明書，並按順序完成步驟，開始測試前請用肥皂或洗手液洗手。


測試材料和臨床樣本在開始分析前必須處於室溫。建議在進行測試時使用手套。

檢查檢測片的保存期限。如果保存期限已過，請勿使用本檢測片。

操作說明


STEP 1

檢查測試組件。

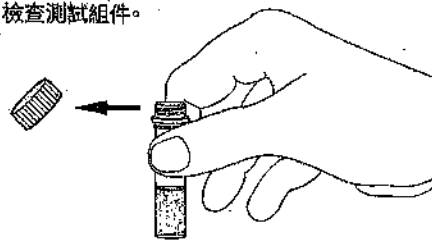

STEP 2


取下一根反應管的蓋子並放入管架。

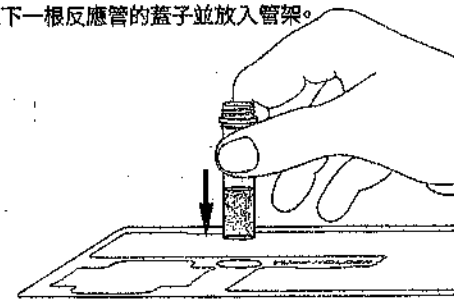

STEP 3

取出鼻腔採檢棒

注意：請勿接觸棉花的部位！

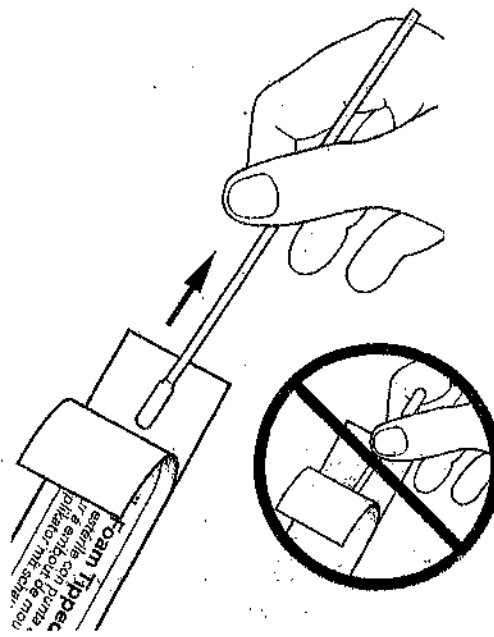

STEP 4


握住採檢棒大約一半的手柄，輕輕將棉頭插入鼻孔1.5-2公分之間。

STEP 5

將棉頭抵靠鼻孔內壁旋轉至少4次。需約15秒，再將其從鼻孔中取出。

STEP 6

使用同一支採檢棒，插入另一個鼻孔重複上述【步驟5】取出樣本。

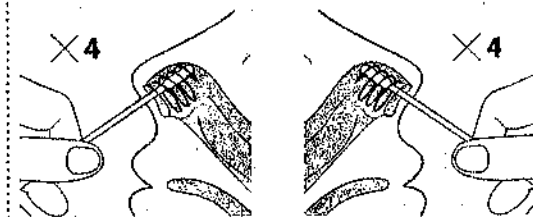


注意：


必須使用相同的採檢棒，從兩個鼻孔取出樣本。如果採集他人樣本，請戴上口罩。對兒童進行採集時，您可請旁人協助托住孩子的頭，且插入鼻孔的最大深度可能小於2公分。樣品採集後應盡快處理。標本採集不當，可能會產生假陰性檢測結果。

進行測試

1. 立即將採檢棒放入打開的反應管中。確保棉頭接觸試管底部。攪拌或旋轉拭子3至4次。

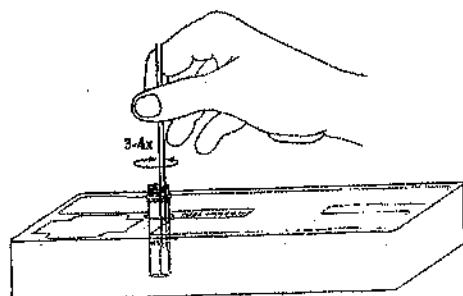


2. 攪拌或旋轉後，將採檢棒留置反應管中至少一分鐘（使用計時器或手錶）。

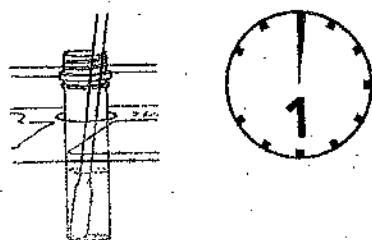

注意：
未滿一分鐘，不應取出採檢棒。如果留置時間過短或過長，可能會出現錯誤或無效的結果。


3. 一分鐘後，小心地從反應管中取出採檢棒。取出採檢棒時，將棉頭部位靠在管壁上摩擦，以盡量擠出液體。取出後，立即將採檢棒妥善密封，依後續丟棄檢驗套組方式處理。

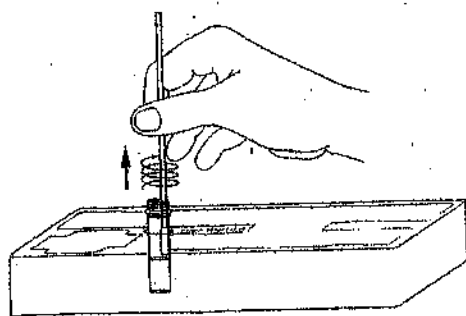

4. 在撕裂標記處小心打開試紙包裝，準備檢測片。小心地取出檢測片，只握住試紙的頂部。

5. 將檢測片放入打開的反應管中，箭頭朝下。將檢測片留在管中10分鐘。未滿10分鐘前，請勿處理或移動檢測片。

6. 十分鐘後，從反應管中取出檢測片，放在平整的表面上。在燈光下檢查測試片以獲得測試結果。必須在從反應管中取出後5分鐘內讀取結果，以避免結果不準確。

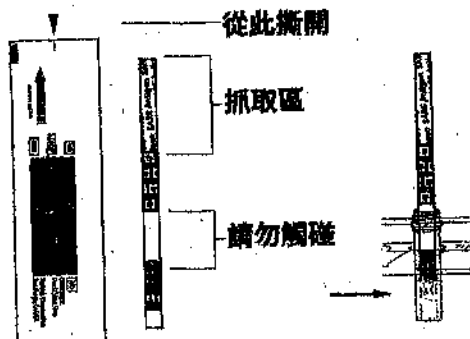

注意：
如果未依建議時間讀取結果，可能會出現假陽性、假陰性或無效結果。

操作說明

陽性結果*

任何淺紅/紅色(測試線)的出現和藍色(控制線)的出現表示 SARS-CoV-2 抗原的測試結果呈陽性。

必須在從反應管中取出後5分鐘內讀取結果，以避免結果不準確，若檢測片放入反應管時間已超過15分鐘，不要再讀取結果(不準確)。

Positive Result



* 陽性結果不排除與其他病原體合併感染。需仔細讀取結果，如最左邊的圖示，淺淺的紅色(測試線)和藍色(控制線)，也是陽性測試結果。

無效結果：

藍色(控制線)沒有出現，即使出現任何粉紅色或紅色(測試線)，結果無效。
背景顏色不清晰，干擾了測試的讀數，結果無效。
如果檢測結果無效，應使用新的採檢棒，並用新的反應管和檢測片重新進行檢測。

Invalid Result



陰性結果**

只有藍色(控制線)出現表示測試結果為陰性。必須在從反應管中取出後5分鐘內讀取結果，以避免結果不準確，若測試片放入反應管時間已超過15分鐘，不要再讀取結果(不準確)。

Negative Result



** 陰性結果不排除 SARS-CoV-2 感染。陰性結果應視為推定結果，可能需要通過分子檢測進行確認。


丟棄檢驗套組

1. 測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢測裝置妥善密封，於前往社區採檢院所篩檢時，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。
2. 測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。
3. 丟棄檢驗套組後，用肥皂和水洗手或使用乾洗手。

製造廠名稱：Quidel Corporation
製造廠地址：10165 Mckellar Court, San Diego, CA92121, USA
醫療器材商名稱：
新富偉生物科技股份有限公司
醫療器材商地址：
新北市中和區中山路二段348巷10號10樓
電話：02-2242-6977

準備好萃取管，將拭子放入管內，擠壓管子兩側並旋轉拭子至少10次。
然後擠壓拭子並從萃取管中移除拭子。蓋上滴管蓋，並插入包裝盒孔洞。


❗ 請勿食用萃取管內的溶液，避免萃取液與皮膚和眼睛接觸。

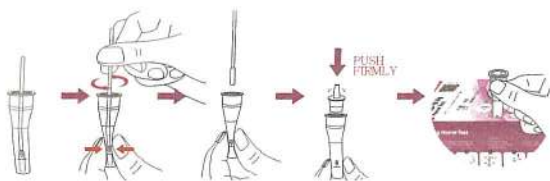

10 X


從袋中取出測試片並放置在平坦的表面上。確認包裝內乾燥劑顏色。

❗ 不要觸摸測試片的結果觀測窗及檢體槽。

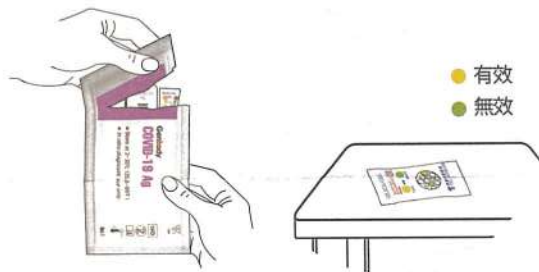

將帶有封閉滴管蓋的萃取管垂直倒置，並在測試片的檢體槽小心擠入4滴溶液。

❗ 請勿將所有溶液從萃取管擠出。

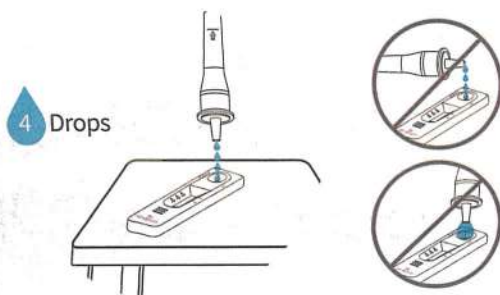


請等待15分鐘並讀取結果。
請勿超過20分鐘再讀取。



..... 等待15分鐘

..... 在15~20分鐘內讀取結果


只有在控制線處 (C) 有一條線

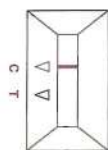

陰性


只有在控制線處(C)有一條線。這表示在測試檢體內沒有偵測到COVID-19抗原。若出現COVID-19症狀，請撥打1922或連繫當地衛生局，依指示盡速就醫。

在控制線處 (C) 和測試線處 (T) 各有一條線

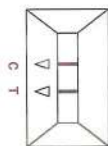


陽性

在控制線處(C)和檢測線處(T)各有一條線。測試線處(T)有任何微弱的紅紫線，都應被視為陽性。

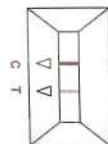


這表示檢體內有偵測到SARS-CoV-2抗原，可能被SARS-CoV-2感染。請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

控制線處 (C) 沒有出現線

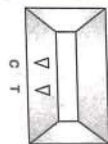

無效

如果控制線(C)沒有出現，這表示無效的結果。請用新的測試片和新的拭子再次檢測，若仍為無效結果，請聯繫購買處。

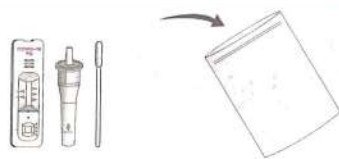

1. 若檢測結果為陰性，請將檢體及檢測裝置妥善放在隨附的萃取溶液袋中密封，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。
2. 若檢測結果為陽性，須前往鄰近的社區採檢院所進行第二次檢測，並將本次自行檢測的檢體及檢測裝置妥善密封，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。

製造業者名稱: GenBody Inc.

製造業者地址: 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31077, Republic of Korea

醫療器材商名稱: 森昌有限公司

醫療器材商地址: 台北市松山區復興北路369號8樓

GenBody

COVID-19 Ag Home Test

SARS-CoV-2 Antigen Self-test

基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組
防疫專案核准輸入第1106036358號

❗ 如果無法準確地按照使用說明進行測試，請在專業人員協助下按照使用說明進行準確的測試。

型號:COVAGHT2-1

使用範圍及用途

本產品為家用型檢驗試劑，利用側向流動原理，定性檢測無論有無症狀或是有其他流行病學原因，疑似感染COVID-19的18歲以上患者之鼻腔拭子檢體是否具有SARS-CoV-2核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。本檢測僅提供初步篩檢結果。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

操作說明影片



01 測試前

測試前請用肥皂或洗手液洗手，並徹底擦乾。



02 準備

測試前請先檢查組件。

❗ 所有的組件都必須在平坦且乾淨的地方進行測試。




測試片

萃取管和滴管蓋

採檢用拭子

說明書 & 快速指南

檢查測試片包裝後面的有效日期和乾燥劑的顏色。如果已經過期，請勿使用。

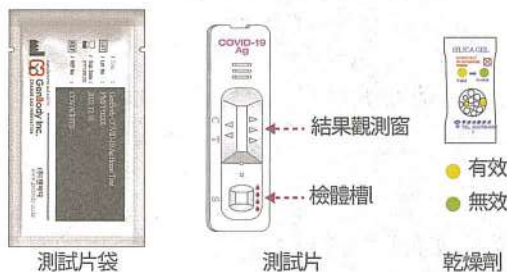

測試片袋

測試片

乾燥劑

● 有效
● 無效


注意:

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心執行相關防疫措施。
3. 本產品僅評估18歲以上人員自行採檢結果，建議應由18歲以上人員使用。

03 採檢

取下萃取管的蓋子，並將其放置於包裝盒上的萃取管盒孔中。

- ❗ 請勿食用萃取管內溶液或接觸到皮膚或眼睛。
- ❗ 若沒有將萃取管插入包裝盒的孔洞裡，萃取管可能會傾倒。

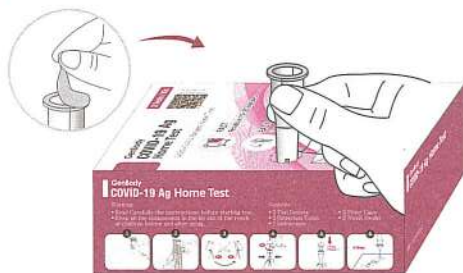

撕開包裝取出用於採檢的拭子。


- ❗ 注意: 取下時請小心不要碰到拭子頂端。



一次測試使用1個拭子

將拭子頭部放入鼻內約1.5公分深位置，緩慢滑動擦拭內壁5次共15秒。在另一個鼻孔重複相同步驟。

- ❗ 請注意不要把拭子放得太深。確保在鼻子兩側收集檢體。

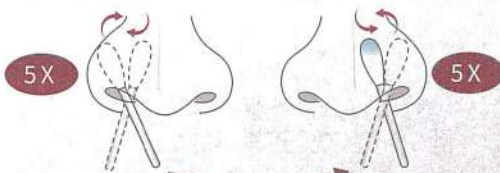

- ❗ 兩個鼻孔應由同一拭子採檢，以確保檢測的準確性。

- ❗ 如果不容易採檢，請用鏡子採集檢體。

REF 41FK51/41FK71
41FK81/41FK91

快速操作指引 - 僅限台灣銷售



ZH

中文 - TAIWAN

Panbio™
COVID-19 Antigen
SELF-TEST

操作說明影片

防疫專案核准輸入第1106019149號

適用範圍

本產品為家用型檢驗試劑用於定性檢測疑似感染COVID-19患者鼻腔檢體中存在的SARS-CoV-2核殼蛋白抗原。Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test 旨在讓未經訓練的使用者進行自我測試，陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。14歲以下兒童及青少年應由家長協助。

注意:

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請立即前往社區採檢院所篩檢，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

內容物

檢測盒規格	內容物
41FK51 (1 Test/Kit)	1 本使用說明冊、1 個測試裝置、1 條提取管、1 個藍色蓋頭、1 個緩衝瓶、1 個拭子、1 個袋子、1 個試管架
41FK91 (4 Tests/Kit)	1 本使用說明冊、4 個測試裝置、4 條提取管、4 個藍色蓋頭、4 個緩衝瓶、4 個拭子、4 個袋子、1 個試管架
41FK71 (10 Tests/Kit)	1 本使用說明冊、10 個測試裝置、10 條提取管、10 個藍色蓋頭、10 個緩衝瓶、10 個拭子、10 個袋子、1 個試管架
41FK81 (20 Tests/Kit)	1 本使用說明冊、20 個測試裝置、20 條提取管、20 個藍色蓋頭、20 個緩衝瓶、20 個拭子、20 個袋子、2 個試管架

必要工具但未含在內:

- 定時裝置

存放及穩定性

1. 將檢測盒存放在陰涼乾燥處(攝氏 2-30 °C)。請勿冷凍檢測盒或內容物。
2. 外包裝所示之有效期限過後，請勿使用檢測盒。
3. 從保護包裝拿出測試裝置後，請立即進行測試。
4. 請勿將測試套件存放在陽光直射處。

警告及注意事項

1. 僅可用於體外診斷。
2. 在執行測試前，請先閱讀說明，請遵循所有指示以獲得準確結果。
3. 處理樣本時切勿進食或吸煙。
4. 測試完成前後均須徹底洗手。
5. 若有溢出物，請使用適當的消毒液徹底清理。
6. 請將所有樣本、反應盒及可能受污染的材料(即拭子、抽取管、測試裝置)置於提供的袋內。
7. 請僅使用測試盒所附緩衝瓶的液體，使用其他液體會導致結果不準確。
8. 請將測試盒放置在兒童無法取得處。
9. 為防止污染，請僅接觸測試裝置兩側，並確保拭子末端僅接觸到鼻腔和抽取管內部。
10. 所提供的拭子僅應用於收集鼻腔(鼻中甲)樣本。
11. 每個測試裝置、拭子、藍色頭蓋、緩衝瓶和袋子均為一次性使用。請勿重複使用個別內容物。試管架可重複使用。
12. 在將拭子插入鼻腔前，請勿將拭子浸入緩衝液或其他液體中。
13. 所附緩衝瓶內含 <0.1% 疊氮化鈉作為防腐劑，攝入可能會導致中毒。如緩衝液不慎接觸眼部，請至少以自來水沖洗 15 分鐘。如仍有刺痛感，請立即尋求醫生協助。
14. 若曾將測試盒存放在冰箱內，請於室溫下(15 至 30°C)靜置 30 分鐘再行使用。
15. 如果袋子損壞或密封破損，請勿使用測試盒。
16. 採樣後應立即測試拭子樣本。

測試限制

1. 本測試盒的內容物係用於透過鼻腔拭子進行 SARS-CoV-2 抗原定性檢測。其他樣本類型可能導致結果不正確，因此切勿使用。此測試無法檢測由 SARS-CoV-2 冠狀病毒以外之微生物引起的肺部感染。
2. 若未能遵循測試程序和結果判讀說明，可能會導致測試成效不彰或產生無效結果。

3. 應由醫護專業人員評估所有臨床及化驗結果之後，才可判斷是否確診。
4. 如樣本收集、提取或運送不當，可能會導致測試結果呈現陰性。如病徵持續，請於 1-2 天後再次測試，因感染早期階段可能無法檢測到冠狀病毒。我們建議您繼續遵守當地的自主隔離政策，並諮詢醫生。
5. 陽性結果並不排除與其他病原體合併感染的可能性。
6. 若早於 15 分鐘或晚於 20 分鐘讀取測試結果，可能會產生不正確的結果。
7. Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test 並非用於在感染後病毒持續排出時進行檢測(可檢測到病毒但不具感染性)，該階段可由 PCR 分子測試檢測。
8. 因會與高濃度的 SARS-CoV 產生交叉反應，感染 SARS-CoV 時可能會出現偽陽性結果。
9. 測試結果無效時，請先等待 4 小時再重複測試。

技術支援

歐洲及中東
+44 161 602 1210
EMEproductsupport@abbott.com

德國
0800 884 8480

加拿大
+1 403 720 7118
CANproductsupport@abbott.com

非洲、俄羅斯及獨立國協(CIS)
+27 10 500 9730
ARCISproductsupport@abbott.com

亞太地區
+81 345 644 373
APproductsupport@abbott.com

拉丁美洲
+57 1794 5968
LAproductsupport@abbott.com

台灣
0809-091182
AP.TechSupport@abbott.com

請掃描 QR 代碼，取得額外的免費電話專線和技術支援窗口。

符號詞彙表

	存放在 2-30°C 環境下		不得重複使用
	體外診斷裝置		批次碼
	請參閱《使用說明》		輻照滅菌
	使用截止日期		採用環氧乙烷滅菌
	製造日期		請勿重新滅菌
	製造商		保持乾燥
	內容物可用於測試 <n> 次		避免陽光直射
	警告		目錄編號
	如果包裝破損，請勿使用		CE 標記
	醫療器械		歐盟授權代表

製造業者名稱: Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
製造業者地址: Orlaweg 1, D-07743 Jena, Germany
醫療器材商名稱: 亞培快速診斷設備股份有限公司
醫療器材商地址: 臺北市松山區南京東路4段16號11樓
www.globalpointofcare.abbott

發行日期: 2021.12
41FK-ST-01-ZH-TW-QRG-A2

鼻腔拭子製造商
Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109
Jiangsu, P.R. China

LIns Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany

FA INC.
10-5, Myeonghaksandanseoro, Yeondong-myeon,
Sejong-si, 30068, Korea

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Germany

© 2021 Abbott. All rights reserved.
All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

請翻頁

使用 Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test 盒前，請仔細閱讀說明，確保結果準確。

14 歲以下兒童及青少年應由家長協助。


以下是完成一次測試的測試程序說明。4 次測試、10 次測試和 20 次測試盒內含可完成多次測試的用具。如測試對象超過一位，請分開測試用具，避免混淆。

開始之前



A. 準備進行測試

- 1. 檢查盒子上的保存期限。如果檢測用品已過期，請勿使用。
2. 使用前，請確保工具靜置在室溫下至少 30 分鐘。打開盒子並取出用品各一份，以進行一次測試。在指示之前，請勿打開個別用品。

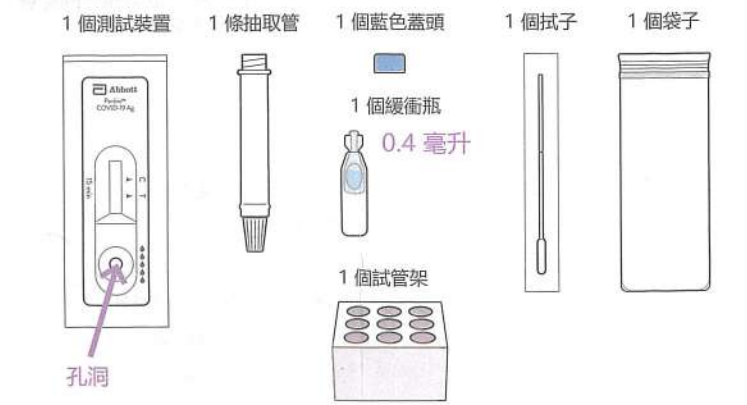

附註：需要計時裝置（時鐘、計時器等），但盒中未提供

- 3. 請保持緩衝瓶直立，接著扭轉和拉動拉片以打開瓶子。

- 4. 將液體從緩衝瓶擠入抽取管中。您需要擠壓至少兩次。

附註：檢查液位。液體應貼齊抽取管側面的滿注線或稍高。

- 5. 在繼續進行下個步驟之前，先將抽取管放入管架。

附註：請注意不要溢出管內容物。

B. 收集鼻腔樣本

！手指請勿靠近拭子端。

- 6. 從末端打開拭子外包裝。取出拭子。

- 7. 將拭子插入兩邊鼻孔。

將拭子的較軟端直接插入鼻孔，直到感覺到阻力為止（約 2 公分）。慢慢旋轉拭子，輕輕沿著鼻腔內部摩擦至少 5 次。將拭子從鼻孔取出。

- 8. 使用相同拭子，在另一鼻孔內重複步驟 7。

停止 檢查：您是否已確實將拭子插入兩邊鼻孔？

- 9. 將拭子插入抽取管。

在液體中旋轉拭子 5 次以上，同時向管壁擠壓。以拭子端擠壓抽取管，排出剩餘的液體。

- 10. 用一隻手牢牢握住抽取管。提起拭子並找到斷裂線。

將斷裂線以上的拭子握把折斷。將拭子留在管中並丟棄截斷處。

- 11. 將藍色蓋頭固定在管子頂部。

將抽取管放回管架，再繼續進行下個步驟。

C. 執行測試

- 12. 拆掉測試裝置的外包裝，並放置在光線充足、平坦的表面上。

- 13. 檢查液體中是否有氣泡。等待氣泡消失，因為這些氣泡可能會導致結果不準確。保持抽取管垂直，白色蓋頭向下。取下白色蓋頭。

！在測試結束前，請勿移動測試裝置。

- 14. 將 5 滴液體從管子擠入測試裝置上的圓孔中。

將白色蓋頭放回管子上，等待 15 分鐘。

附註：如果發生堵塞，請輕壓抽取管底部。

！此時請勿觸碰測試裝置。

- 15. 將測試裝置平放在桌上。

請於 15 分鐘時讀取結果。請不要早於 15 分鐘或晚於 20 分鐘讀取結果。



附註：控制 (C) 線可能會於幾分鐘內出現在結果視窗中，但測試 (T) 線可能需要 15 分鐘才會出現。

附註：若超過 20 分鐘，結果可能會變得不準確。

D. 讀取測試結果


無效的結果（測試無作用）

尋找結果視窗。如果控制 (C) 線沒有出現，就表示測試無作用且無效。可能是因測試程序不正確而導致，請再次進行測試。



陽性結果


查找結果視窗並仔細查看是否出現兩條線。陽性結果：如果看到控制 (C) 和測試 (T) 兩線，就表示檢測到 COVID-19。

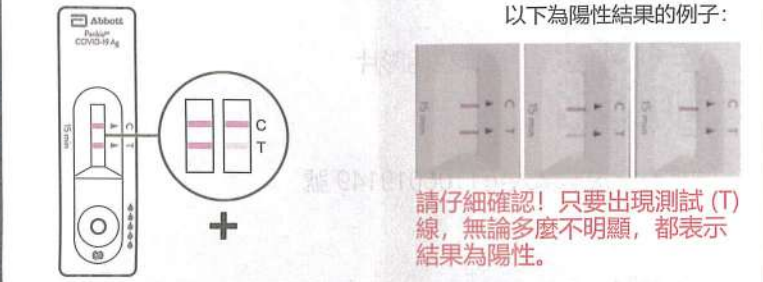

您很可能感染 COVID-19，請立即前往社區採檢院所篩檢，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

陰性結果

查找結果視窗並在視窗中確認是否出現一條線。陰性結果：如果您只看見控制 (C) 線，表示未偵測到 COVID-19。

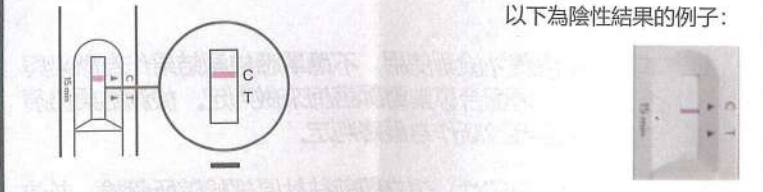

如果您的測試結果為陰性，但您的身體出現 COVID-19 症狀，請撥打 1922 或連繫當地衛生局，依指示儘速就醫。

E. 丟棄測試盒

- 16. 測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢測裝置妥善密封，於前往社區採檢院所篩檢時，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中密封，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。

